

Kompatibilitäts Guide

Empulse M90



11/2025

Hersteller / Model	Hersteller / Model
Sunrise Medical	
QS5 X / QS5 X SA	
Neon² SA	
Xenon² / Xenon² Hybrid	
Xenon² SA	
Helium	
Nitrum	
Easy 200	
Easy 300	
Easy Life ECO	
Easy Life R / Easy Life R SA	
Easy Life RT / Easy Life RT SA	
Easy Life T / Easy Life T SA	
Easy Life i	
Easy Life / Easy Life SA	
Argon²	
Simba	
Youngster 3	
HeliX²	
RubiX²	
BasiX²	
PariX²	
Ibis	

Bitte beachten Sie: Die oben stehende Liste gibt einen Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der M90 montiert werden kann. Rahmenform, CoG, Radgröße und Sitztiefe spielen jedoch eine wichtige Rolle. Daher empfehlen wir, die Kombination unbedingt zu testen, um 100% sicher zu sein! Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Übersicht zeigt nur Rollstühle, für die eine verbindliche Kombinationsvereinbarung vorliegt. Weitere Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite..

Kompatibilitätsprüfung für starre & faltbare Rollstühle

1 - Kombinationserklärung - Bitte überprüfen Sie, ob die Kombination zwischen dem Empulse M90 und Ihrem spezifischen Rollstuhl freigegeben ist. Sie finden die Kombinationsübersicht unter www.sunrisemedical.de.

2 - Technische Anforderungen

- Antriebsrad Größe 24"
- Radsturtz 0°
- Sicherheitsräder aus Sicherheitsgründen immer empfohlen
- Stellen Sie sicher, dass genug Platz am Vorderrahmen des Rollstuhls verfügbar ist, um den M90 Dual Controller zu montieren (30 mm)

3 - Technische No-Gos



- Carbon Achse
- Federung hinten
- Wenn der Achsdurchmesser des vorhandenen manuellen Rades nicht 12,7 mm beträgt, besteht die Möglichkeit, ein manuelles Rad von Sunrise Medical zu bestellen, das mit der neuen Achseinheit kompatibel ist.
- Kombination von M90 und Trommelbremse nicht möglich
- Xenon² (sowohl FF als auch SA) und Neon² – Eine Kombination aus M90 und Leichtgewichts Adapter ist nicht möglich.

Hinweis: Zusätzliche "No-Go" - Tabellen werden auf Seite 3 folgend aufgeführt.

4 - Mounting Kit

- Zwei Aufnahmehalterungen werden fest an der Achshalterung montiert, so dass die Verwendung von Handrädern weiterhin möglich ist.
- Die Aufnahmehalterungen für die linke Seite des Stuhls enthält einen Magneten, der in Richtung der Vorderseite oder der Oberseite des Stuhls angebracht werden muss.
- Die Aufnahmehalterungen für die rechte Seite wird ohne Magnet geliefert und muss in Richtung der Rückseite oder des Bodens des Stuhls montiert werden.

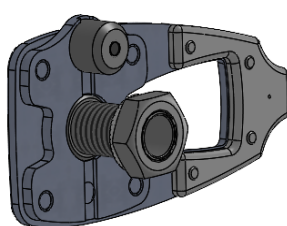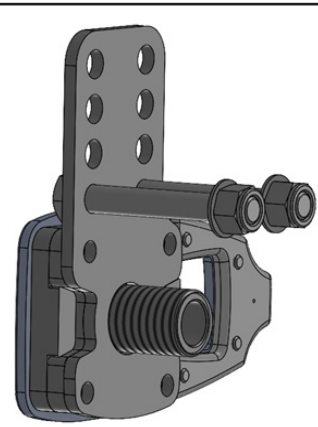

Faltrollstühle mit Achsplatten	Starrrahmenrollstühle mit Achsplatten
 • Montagelösung mit Drehmomentstütze • Durchmesser und Formschluss zur rollstuhl-spezifischen Achsplatte	 • Drehmoment-Stützplatte mit Stiften oder Schrauben, eventuell Achsmanschette • Form und Design passend zum jeweiligen Rollstuhl

QS5 X

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt				
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	QSC040002 & QSC040003 & QSC040004		25	40	50	60	75
		370	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		380	Go	Go	Go	Go	Go
		390	Go	Go	Go	Go	Go
		400	Go	Go	Go	Go	Go
		410	Go	Go	Go	Go	Go
		420	Go	Go	Go	Go	Go
		430 & 440	Go	Go	Go	Go	Go
		450	Go	Go	Go	Go	Go
		460	Go	Go	Go	Go	Go
		470	Go	Go	Go	Go	Go
		480 & 490	Go	Go	Go	Go	Go
		500	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
Seitenteil Zentralstütze, höheneinstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeineinstellbar	QSC040052		25	40	50	60	75
		370	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		380	NoGo	NoGo	Go	Go	Go
		390	NoGo	Go	Go	Go	Go
		400	Go	Go	Go	Go	Go
		410	Go	Go	Go	Go	Go
		420	Go	Go	Go	Go	Go
		430 & 440	Go	Go	Go	Go	Go
		450	Go	Go	Go	Go	Go
		460	Go	Go	Go	Go	Go
		470	Go	Go	Go	Go	Go
		480 & 490	Go	Go	Go	Go	Go
		500	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe) & Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, Kleiderschutz (in Rahmenfarbe) & Seitenteil Carbon, Kälteschutz, Kleiderschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) & Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz & Armlehnenrohr, Aluminium, abschwengbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz	QSC040102 & QSC040103 & QSC040104 & QSC040107 & QSC040117		25	40	50	60	75
		370	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		380	Go	Go	Go	Go	Go
		390	Go	Go	Go	Go	Go
		400	Go	Go	Go	Go	Go
		410	Go	Go	Go	Go	Go
		420	Go	Go	Go	Go	Go
		430 & 440	Go	Go	Go	Go	Go
		450	Go	Go	Go	Go	Go
		460	Go	Go	Go	Go	Go
		470	Go	Go	Go	Go	Go
		480 & 490	Go	Go	Go	Go	Go
		500	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo

Easy Life i

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt					
Seitenteil Zentralstütze, höhenstellbar, Armpolster (330 mm) tiefenstellbar	LII040052		0	10	20	30	40	50
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		410	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		430	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		500	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		510	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
Seitenteil mit Armpolster (330 mm), höhen- und tiefenverstellbar	LII040054		0	10	20	30	40	50
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		410	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	Go	Go	Go	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	Go	Go	Go	NoGo
		500	Go	Go	Go	Go	Go	Go
		510	Go	Go	Go	Go	Go	Go

Easy 200

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
Deskseitenteil höhenverstellbar, kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstellbar, lang (310 mm) & Seitenteil, fest, kurz (250 mm) & Seitenteil, fest, lang (310 mm) & Seitenteil fest, ohne Polster	ESY040003 & ESY040004 & ESY040005 & ESY040006 & ESY040007		25	45	65	85
		430	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		440	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		460	NoGo	NoGo	Go	Go
		470	NoGo	NoGo	Go	Go
		480	NoGo	Go	Go	Go
		490	Go	Go	Go	Go
		500	Go	Go	Go	Go

Easy 300

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
			25	45	65	85
Deskseitenteil höhenverstellbar, kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstellbar, lang (310 mm) & Seitenteil, fest, kurz (250 mm) & Seitenteil, fest, lang (310 mm) & Seitenteil fest, ohne Polster	EAY040003 & EAY040004	430	NoGo	NoGo	NoGo	Go
	EAY040005 & EAY040006	440	NoGo	NoGo	NoGo	Go
	EAY040007	460	NoGo	NoGo	Go	Go
		470	NoGo	NoGo	Go	Go
		480	NoGo	Go	Go	Go
		490	Go	Go	Go	Go
		500	Go	Go	Go	Go

Easy Life ECO

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt					
			0	10	20	30	40	50
Seitenteil Zentralstütze, höheinstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeinstellbar	LEC040052							
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		410	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		430	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		500	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
	LEC040054	510	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
			0	10	20	30	40	50
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		410	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	Go	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	Go	Go	Go	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	Go	Go	Go	NoGo
		500	Go	Go	Go	Go	Go	Go
		510	Go	Go	Go	Go	Go	Go

Easy Life

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar	LFE040001 & LFE040002 & LFE040003 & LFE040004 & LFE040005		23	43	63	83
		430	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		440	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		460	NoGo	NoGo	Go	Go
		470	NoGo	NoGo	Go	Go
		480	NoGo	Go	Go	Go
		490	Go	Go	Go	Go
		500	Go	Go	Go	Go
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar	LFE040052		23	43	63	83
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	NoGo	NoGo
		500	Go	Go	NoGo	NoGo

Easy Life R

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar	LRF040052		23	43	63	83
		390	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		430	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo

Easy Life RT

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeineinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar	LRT040052		23	43	63	83
		390	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		430	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	NoGo	NoGo
Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 250 mm lang & Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 360 mm lang	LRT040050 & LRT040051		23	43	63	83
		390	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		400	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		420	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		450	Go	Go	NoGo	NoGo
		460	Go	Go	Go	NoGo

Easy Life T

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe	Schwerpunkt			
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	LFT040001 & LFT040002 & LFT040005 & LFT040006 & LFT040007		23	43	63	83
		430	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		440	NoGo	NoGo	NoGo	Go
		460	NoGo	NoGo	Go	Go
		470	NoGo	NoGo	Go	Go
		480	NoGo	Go	Go	Go
		490	Go	Go	Go	Go
		500	Go	Go	Go	Go
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeineinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar	LFT040052		23	43	63	83
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		470	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	NoGo	NoGo
		500	Go	Go	NoGo	NoGo
Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 250 mm lang & Zentralstütze, Armpolster, höhenverstellbar, abnehmbar, 360 mm lang	LFT040050 & LFT040051		23	43	63	83
		430	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		440	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		460	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		470	NoGo	NoGo	NoGo	NoGo
		480	Go	NoGo	NoGo	NoGo
		490	Go	Go	NoGo	NoGo
		500	Go	Go	Go	NoGo