



viamobil, viamobil eco & via go – Schiebe- & Brems-hilfen für Begleitpersonen

viamobil, viamobil eco und via go sind CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und wurde auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd nach der neuesten Ausgabe der Produktnorm EN 12184 geprüft.

Unser Qualitätsanspruch – deine Sicherheit! Alber ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagementstandard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte garantieren wir durch unser Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001.

Jetzt kostenlos und unverbindlich testen:

viamobil.alber.de/probefahrt
viamobileco.alber.de/probefahrt
viago.alber.de/probefahrt

Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen
info@alber.de
www.alber.de

Telefon: 0800 1224567 (gebührenfrei)
Mo.–Do. 8:00–17:00 (durchgehend)
Fr. 8:00–16:00 (durchgehend)



MADE IN GERMANY ■■■

26.0011.6.01.01 Stand 09/2024 © Alber GmbH, Albstadt.
Technische Änderungen vorbehalten.



viamobil[®]
viamobil eco[®]
via go[®]



via family.

Schiebe- und Bremshilfen – für die optimale Unterstützung von Begleitpersonen.

www.alber.de



Inhalt

03 einfach kennenlernen

- 03 Einleitung
- 05 via family im Vergleich

07 viamobil

- 09 Produktvorstellung / passt viamobil zu dir?
- 11 Vorteile
- 13 Technik & Funktionen / Komponenten / Anbau / Zubehör

19 viamobil eco

- 21 Produktvorstellung / passt viamobil eco zu dir?
- 23 Vorteile
- 25 Technik & Funktionen / Komponenten / Anbau / Zubehör

31 via go

- 33 Produktvorstellung / passt via go zu dir?
- 35 Vorteile
- 37 Technik & Funktionen / Komponenten / Anbau

41 service

- 41 Alber Service / Kontakt

viamobil

viamobil eco

via go

Service



Gemeinsam: einfach leichter.

Die Schiebe- und Bremshilfen der via-Produktfamilie von Alber machen das Leben leichter und sicherer. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn sich eine pflegebedürftige Person nicht mehr selbst im Rollstuhl fortbewegen kann und die Begleitperson kraftvolle Unterstützung benötigt, um den Rollstuhl sicher zu schieben und zu steuern. Die elektrischen Zusatzantriebe können an nahezu jedes Rollstuhlmodell angebracht werden.

Die via family besteht aus drei verschiedenen Modellen, jedes von ihnen ausgelegt für eine bestimmte Anwendungsart. **viamobil** ist eine Schiebe- und Bremshilfe, die der Begleitperson besonders kraftvolle Unterstützung bietet. **viamobil eco** ist die perfekte Alternative, wenn die Anforderungen an das maximale Personengewicht weniger hoch sind. **via go** ist eine reine Schiebehilfe und überzeugt durch die kompakten Maße und das geringe Gewicht.

Die elektrischen Zusatzantriebe unterstützen die Begleitperson beim Schieben und Bremsen.

In einem Punkt unterscheiden sich die via-Modelle allerdings nicht: Sie alle stehen für gewohnte Alber-Produktqualität, höchstes technisches Niveau sowie praxiserprobte Nutzerfreundlichkeit. Dadurch ermöglichen sie die Rückkehr zu einem selbstbestimmteren Leben – und machen dich einfach mobil. Teste jetzt die verschiedenen Modelle beim Fachhändler deines Vertrauens und finde heraus, welches am besten zu dir passt.

Unser Antrieb: deine maximale Bewegungsfreiheit. Als Marktführer für Rollstuhlzusatzantriebe blickt die Alber GmbH auf mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Elektromobilität zurück. Wir sind anerkannter Partner der Krankenkassen und arbeiten deutschlandweit mit 1.700 Sanitätsfachhändlern zusammen. Von der ersten Beratung bis zum Service: Wir sind an deiner Seite.

Unser Qualitätsanspruch: Deine Sicherheit. Die Alber GmbH ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.



KOMFORTABEL STARK VIELSEITIG

viamobil – die komfortable Schiebe- und Bremshilfe für Begleitpersonen.

Der elektrische Zusatzantrieb für Standard- und Pflege-rollstühle bietet jederzeit kräftige Unterstützung und sicheres Bremsen auf Steigungen, Gefällen oder Rampen. Er überzeugt mit höchster Bedienerfreundlichkeit, absoluter Zuverlässigkeit und einem besonders starken Antrieb.

CLEVER BEQUEM ZUVERLÄSSIG

viamobil eco – die clevere Schiebe- und Bremshilfe für Begleitpersonen.

Das **viamobil eco** passt an fast alle Standardrollstühle, ist besonders bedienerfreundlich und intuitiv steuerbar. Die ergonomischen Griffe und das ruhige Fahrgefühl sorgen zudem dafür, dass du auch längere Strecken ganz bequem und mühelos zurücklegen kannst.

KOMPAKT KRÄFTIG INTUITIV

via go – die kompakte Schiebehilfe für Begleitpersonen.

Das **via go** ist die perfekte Ergänzung für Standard- und Leichtgewichtrollstühle. Die kleine und dennoch kräftige Schiebehilfe überzeugt mit kompakten Maßen und bietet dir dadurch größte Flexibilität.

Technische Daten im Vergleich

			
	viamobil	viamobil eco	via go
Funktion	Schieben & Bremsen	Schieben & Bremsen	Schieben
Hilfsmittelnummer	18.99.04.1023	18.99.04.1012	18.99.12.1003
Geschwindigkeit	1–5,5 km/h	1–5,5 km/h	1,5–5,5 km/h
Gewicht			
gesamt	13,3 kg	18,2 kg	6,5 kg
max. Personengewicht*	160 kg	120 kg	150 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht (via, Rollstuhl & Rollstuhlfahrer)	210 kg	170 kg	170 kg
Steig- & Bremsfähigkeit max.**/**	18 %	10 %	16 %
Akku 	37 V; 5,85 Ah Lithium-Ionen Die Akkus sind IATA konform und können im Flugzeug mitgenommen werden	2 x 12 V / 7,2 Ah	36 V; 4,5 Ah Lithium-Ionen
Reichweite**/**	bis zu 20 km	bis zu 12 km	bis zu 16 km



* Aus Sicherheitsgründen ist ab 4,5° (8 %) die Verwendung von Kippstützen für den jeweiligen Rollstuhl vorgeschrieben
** Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie
*** In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich

DIE VIA FAMILY

Gemeinsam: einfach stärker.



viamobil

viamobil ist besonders kraftvoll und trotzdem handlich und einfach zu transportieren. Es eignet sich daher auch bei begrenztem Platzangebot hervorragend zur Mitnahme. Mit nur wenigen Handgriffen kannst du viamobil ohne Werkzeug vom Rollstuhl abnehmen und genauso schnell wieder anbringen.



viamobil eco

In nur wenigen Sekunden ist das viamobil eco in drei kompakte Teile zerlegt und komfortabel im Kofferraum verstaut. Auch hierfür benötigst du weder Werkzeug noch besondere technische Kenntnisse.



via go

Auch das leichte und kompakte via go ist ideal für den Transport geeignet und muss dafür nicht einmal vom Rollstuhl abgenommen werden. Mit dem großen Griff lässt es sich völlig mühelos an- und abdocken und ist immer dann einsatzbereit, wenn du Unterstützung beim Schieben brauchst.





KOMFORTABEL STARK VIELSEITIG

viamobil®

Die komfortable Schiebe- und Bremshilfe für Begleitpersonen.





viamobil passt zu dir, wenn:

- ✓ du einen Standard- oder Pflegerollstuhl hast (mit den meisten Modellen kombinierbar).
- ✓ die Begleitperson Entlastung im Alltag, auf Spaziergängen oder auf Ausflügen benötigt.
- ✓ du dir ein besonders belastbares, robustes und langlebiges Produkt wünschst.
- ✓ dir durchdachte Funktionalität und eine intuitive, nutzerfreundliche Bedienung wichtig sind.
- ✓ du einen Antrieb suchst, der sowohl im alltäglichen Gebrauch als auch im Rahmen einer aktiven Freizeitgestaltung voll überzeugt.

Kraftvoll bergauf – sicher bergab.

Steigungen, Rampen und Gefälle können für Rollstuhlfahrende und ihre Begleitpersonen zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Mit dem leistungsstarken viamobil gehören solche Einschränkungen der Vergangenheit an und die Mobilität erhält neuen Antrieb.

Die Schiebe- und Bremshilfe viamobil überzeugt mit gewohnt langlebiger Alber-Qualität und ist dank seiner durchdachten Konstruktion mit beinahe jedem Standard- und Pflegerollstuhl kombinierbar. Mit viamobil bewältigst du auch Steigungen und Gefälle von bis zu 18 % (entspricht 10°) ohne

jeglichen Kraftaufwand. Dabei können Personen mit einem Gewicht von bis zu 160 kg befördert werden. Möglich macht's der starke Akku, der dich auch auf längeren Touren zuverlässig unterstützt.

Einfach mehr erreichen: Die steile Hofeinfahrt ist kein Problem mehr, der Spaziergang in hügeligem Terrain wird wieder zum mühelosen Vergnügen – mit viamobil wird Mobilität wieder zu einer Selbstverständlichkeit.

Du kannst lästige Einschränkungen einfach hinter dir lassen und führst wieder ein aktives, selbstbestimmtes Leben.



Gemeinsam: mehr erreichen.

KOMFORTABEL

Einfach mehr Entspannung.

viamobil macht nicht nur jeden Weg sondern auch jeden Handgriff so angenehm wie möglich und überzeugt durch größten Komfort in der Nutzung. Die Schiebe- und Bremshilfe ist in kürzester Zeit an- und abmontiert und lässt sich dank kompakter Einzelkomponenten auch besonders leicht transportieren.

Durch die Federung des Antriebsrads sitzt die Person im Rollstuhl bequem, während die Steuerung mittels ergonomischer Bediengeräte am Griff besonders angenehm für die Begleitung ist.

- ✓ Platzsparend und leicht zu transportieren durch leichte, modulare Einzelkomponenten
- ✓ EasyConnex Stecker arretieren magnetisch
- ✓ Antriebsrad hebt und senkt sich automatisch
- ✓ Leichtgängige Steuerung mit intuitivem Bediengerät



STARK

Einfach mehr Antrieb.

Entdeckt gemeinsam neue Ziele ohne Sorgen um den Weg dorthin. Mit dem kraftvollen viamobil bewältigst du Steigungen ohne Anstrengung und wirst auch bergab beim Bremsen sicher unterstützt. Dabei wird die von dir gewählte Geschwindigkeit konstant gehalten – wie bei einem Tempomat. Das automatische Federsystem und das Antriebsrad aus griffigem, pannensicheren Vollgummi sorgen auch auf unwegsamem Gelände für konstanten Anpressdruck. Der leichte Lithium-Ionen-Akku ist außerordentlich leistungsfähig und ermöglicht so ausgedehnte Ausflüge.

- ✓ Automatische Motorbremse sichert viamobil im Stand vor dem Wegrollen
- ✓ Reichweite* bis zu 20 km
- ✓ Steigungen/Gefälle bis zu 18 %
- ✓ Personengewicht bis zu 160 kg



VIELSEITIG

Einfach mehr Möglichkeiten.

viamobil ist mit beinahe jedem Rollstuhltyp kombinierbar. So kann einfach das Modell, das aus therapeutischen Gesichtspunkten am besten passt, genutzt und nach Bedarf mit der Schiebe- und Bremshilfe ergänzt werden. Nach einmaliger Montage einer Halterung durch den Fachhändler, ist die Anbringung einfach und ohne Werkzeug oder technische Kenntnisse zu bewerkstelligen. Der Rollstuhl selbst bleibt in seiner Funktion (z. B. Faltbarkeit) in vollem Umfang erhalten, während der Komfort und die Mobilität deutlich gesteigert werden.

- ✓ Kompatibel mit Standard- und Pflegerollstühlen ohne Einschränkung der Funktion
- ✓ Weiteres Zubehör für dein Anwendungsprofil (s. Seite 18)



viamobil kostenlos testen.



Vereinbare jetzt online deine unverbindliche viamobil Probefahrt auf viamobil.alber.de/probefahrt

LIEFERUMFANG

Gehört einfach dazu.



Antriebseinheit/Akkupack



E-Antriebsrad mit herausnehmbarem Akkupack.

Bediengerät



Ergonomische Steuerung mit übersichtlichem Display

Automatik-Ladegerät



EasyConnex Stecker verbindet sich automatisch mit dem Akkupack.

ANTRIEBSEINHEIT

Die Steig- und Bremshilfe viamobil überzeugt durch die hohe Qualität und das durchdachte Design ihrer einzelnen Komponenten. Herzstück ist die kraftvolle und kompakte Antriebseinheit mit herausnehmbaren Akkupack.

Leistungsstark

Personengewicht bis zu 160 kg
Reichweite* bis zu 20 km

Kompakt


Der Akkupack ist dank modernster Lithium-Ionen Technik besonders kompakt und leicht (nur 2,4 kg).

Pannensicheres Antriebsrad

mit besonders griffigem Reifen und Federung.

Anschluss von Bediengerät und Ladegerät

mit magnetischem EasyConnex Stecker.

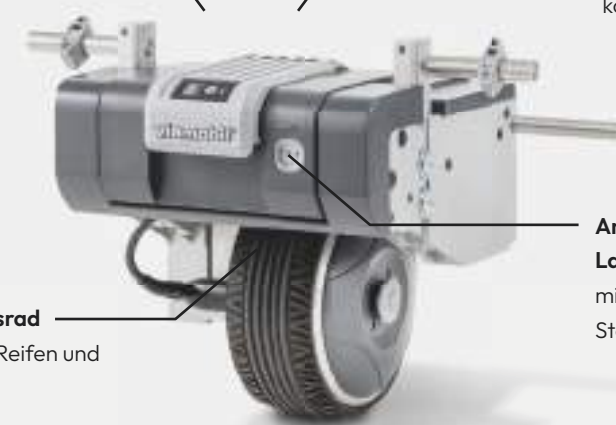

BEDIENGERÄT

Die ergonomische und leichtgängige Steuerung in bietet höchsten Komfort auf Knopfdruck. Dank großem und übersichtlichem Display sind alle Funktionen intuitiv verständlich.

Ein-/ Aus-Schalter

Antriebsrad senkt/hebt sich automatisch

Fahrtrichtungsschalter

vorwärts/rückwärts

Batterieanzeige

Reichweite immer im Blick

Geschwindigkeitsvorwahl

Passe die Geschwindigkeit deinem Tempo an



Fahrhebel

viamobil beschleunigt beim Ziehen des Fahrhebels und bremst beim Loslassen wieder sanft und sicher ab.




KOMBINATION MIT DEM ROLLSTUHL

Starke Partner.

Eins, zwei, drei – immer dabei.

Zur Aufnahme des viamobil muss lediglich eine dezente, leichte Halterung fest am Rollstuhl montiert werden. Dies übernimmt dein Fachhändler nach individueller Prüfung deines Rollstuhlmodells. Danach kannst du alle Komponenten einfach jederzeit selbst andocken und wieder abnehmen.

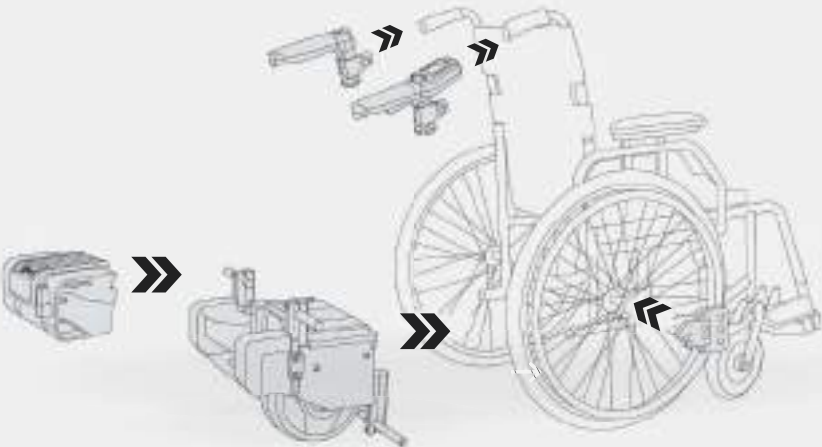

Halterungen für viamobil werden von deinem Fachhändler individuell ausgewählt und am Rollstuhl montiert.



So einfach geht's:



1. Antriebseinheit einhängen
Antriebseinheit einhängen und mit Schnellverschlüssen sicher verriegeln.



2. Bedieneinheit anbringen
Die Halterung der Bedieneinheit wird per Stecksystem an den Schiebegriffen des Rollstuhls befestigt.



3. Bedieneinheit & Antrieb verbinden
Der Stecker des Bediengerätes verbindet sich magnetisch mit dem Akku.

Technische Daten

Hilfsmittelnummer:	18.99.04.1023
Geschwindigkeit	1–5,5 km/h
Gewicht gesamt	13,3 kg (Antrieb 10,3 kg, Akku-Pack 2,4 kg, Bediengerät 0,6 kg)
max. Personengewicht	160 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	210 kg (viamobil, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer)
Steig- & Bremsfähigkeit	Bis zu 10,2° (18 %)
Reichweite*	Bis zu 20 km
Akku	37 V, 5,85 Ah (auslaufsicher und wartungsfrei, Lithium-Ionen, 24 Monate Garantie, nach UN 38.3 getestet, für Flugtransport geeignet)
Ladezeit	Ca. 5 Stunden
Maße	280 x 320 x 270 mm (L x B x H)

* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie



i viamobil auf Rezept.

Als anerkanntes Hilfsmittel kann viamobil von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen.

Hilfsmittelnnummer viamobil:
18.99.04.1023

Zubehör

viamobil passt sich komfortabel an den jeweiligen Rollstuhl an – und natürlich auch an die Bedürfnisse der Begleitperson. So ist die Montage ebenso bequem und einfach wie die tägliche Nutzung.

01. Kippstützen

Ganz bequem mit einem Schnellverschluss befestigt, verhindern die Kippstützen das Überkippen an steilen Steigungen oder Rampen. An Bordsteinen und Absätzen schwenken sie automatisch weg. Aus Sicherheitsgründen sind sie beim Befahren von Steigungen von mehr als 8% vorgeschrieben.

02. Zusatzschiebegriff

Perfekt einstellbar auf die Größe jeder Begleitperson für besonders ergonomische Bedienung. Sie erleichtern zudem das Andocken an den Rollstuhl.



Eine Übersicht über das komplette Zubehörprogramm findest du auf:
www.alber.de/viamobil/zubehoer

01.



02.





CLEVER BEQUEM ZUVERLÄSSIG

viamobil eco®

Die clevere Schiebe- und Bremshilfe für Begleitpersonen.





Einfach bergauf – entspannt bergab.

Mit viamobil eco erlebst du die neue Leichtigkeit des Schiebens. Ganz egal ob bergauf oder bergab, ob an steilen Rampen oder Auffahrten oder auch bei längeren Wegstrecken – viamobil eco bietet Begleitpersonen jederzeit das rechte Maß an Unterstützung beim Schieben des Rollstuhls. Mit der Schiebe- und Bremshilfe für Rollstühle gestaltest du deinen Alltag leichter und freier.

Die intelligente Federung des viamobil eco bietet sowohl der Person im Rollstuhl als auch der Begleitperson großen Komfort und ein ruhiges Fahrgefühl.

So kann die gemeinsame Mobilität wieder unbeschwert genossen werden und du kannst dein Leben aktiv gestalten.

viamobil eco passt zu dir, wenn:

- ✓ du einen Standardrollstuhl hast (mit den meisten Modellen kombinierbar).
- ✓ die Begleitperson Entlastung bei regelmäßigen Spaziergängen oder auf kleinen Ausflügen benötigt.
- ✓ du Wert auf eine unkomplizierte sowie intuitive Bedienung legst.
- ✓ du nach einem Antrieb suchst, der durch ein komfortables und sicheres Fahrgefühl überzeugt.



Gemeinsam: genau richtig.

CLEVER

Einfach unkompliziert.

Wieder gemeinsam einkaufen gehen, Bekannte besuchen oder die Natur erleben: So leicht kann Rollstuhlschieben sein.

Das bestätigt auch der TÜV, der viamobil eco nach Praxistests mit Anwendern das Prädikat „Einfach zu bedienen“ verlieh.

viamobil eco ist überall einsetzbar. Im Handumdrehen lässt sich die Schiebe- und Bremshilfe in wenige kompakte Einzelteile zerlegen und passt so selbst in einen kleinen Kofferraum.

- ✓ Einfache, intuitive Handhabung
- ✓ Platzsparend in drei Teile zerlegen und im Auto transportieren
- ✓ Passt dank der durchdachten Ankoppel-Vorrichtung an die meisten Standard-Rollstühle und kann ohne Werkzeug am Rollstuhl angedockt werden



BEQUEM

Einfach angenehm.

Die pneumatische Federung des viamobil eco gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine bequeme Fahrt. Die Federung sorgt zudem für einen konstanten Anpressdruck und somit für ein ruhiges Fahrverhalten bergauf und bergab.

Der Fahrhebel kann besonders mühelos mit dem Daumen bedient werden: mit nur leichtem Druck in natürlicher Bewegungsrichtung. Die Bedieneinheit ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder verfügbar.

- ✓ Intelligente Federung sorgt für ruhiges Fahrgefühl
- ✓ Bedieneinheit mit ermüdungsfreier Daumensteuerung
- ✓ Senken und Heben des Antriebsrades mittels Fußpedal



ZUVERLÄSSIG

Einfach sicher.

Mit viamobil eco bist du jeder Situation und jeder Strecke gewachsen – der kräftige Motor bewältigt Steigungen und Gefälle von bis zu 10 %. Die nutzerfreundliche Schiebe- und Bremshilfe unterstützt nicht nur bergauf, sondern bietet dank der automatischen Bremsfunktion auch bergab ein großes Plus an Sicherheit.

Die pneumatische Federung und pannensichere Antriebsräder sorgen dazu immer für den optimalen Bodenkontakt.

- ✓ Einfach sicher bergab mit der automatischen Bremsfunktion
- ✓ Pannensichere Antriebsräder
- ✓ Bis zu 12 km Reichweite*
- ✓ Bis zu 120 kg Personengewicht



viamobil eco kostenlos testen.



Vereinbare jetzt online deine unverbindliche viamobil eco Probefahrt auf viamobil-eco.alber.de/probefahrt

LIEFERUMFANG

Zu zweit: bereit.



Griff mit Bedieneinheit



Greiffeinheit mit breitem Lenker

Akku + Ladegerät



Kompakter Akkupack mit integrierter Ladebuchse.

Antriebseinheit



Aufnahme des Akkus / Antriebsräder mit pneumatischer Federung

ANTRIEBSEINHEIT

viamobil eco ist mit nahezu jedem gängigen Standard-Rollstuhl-Modell kombinierbar. Mit dem kräftigen Motor bewältigst du bequem Steigungen oder Gefälle und kommst dank intelligenter Federung immer sicher und entspannt an deinem Ziel an.



Bolzen für Halterung
einfache Fixierung am Rollstuhl


Pedal zum Anheben/Absenken
der Antriebsräder

Kompakter Akku-Pack
mit integrierter Ladebuchse
Personengewicht bis zu 120 kg
Reichweite* bis zu 12 km

Pannensichere Antriebsräder
aus griffigem Vollgummi

BEDIENGERÄT

Die ergonomische Bedieneinheit mit ermüdungsfreier Daumensteuerung funktioniert ganz simpel: Alle Einstellungen werden mittels handlichem Griffdrehknopf vorgenommen.

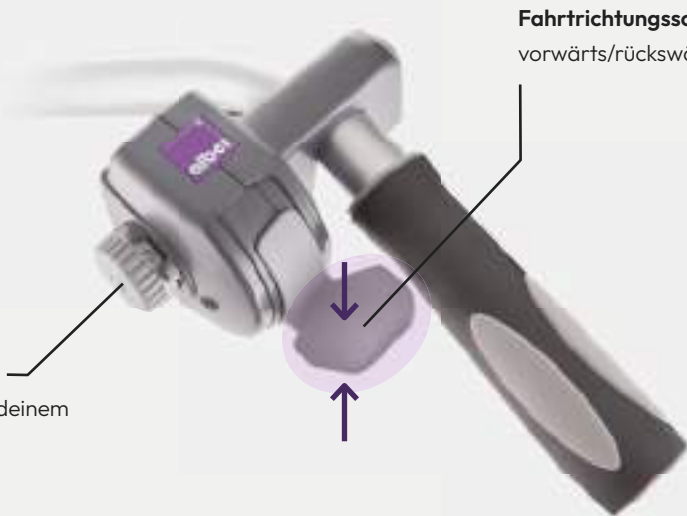

Geschwindigkeitsvorwahl
Passe die Geschwindigkeit deinem Tempo an


Fahrtrichtungsschalter
vorwärts/rückwärts

KOMBINATION MIT DEM ROLLSTUHL

Clever & smart.

Schnell kombiniert dank durchdachter Ankoppel-Vorrichtung.

Zur Anbringung des viamobil eco muss lediglich eine Halterung fest am Rollstuhl montiert werden. Dein Fachhändler erledigt das schnell und unkompliziert nach individueller Prüfung deines Rollstuhlmodells. Danach kannst du viamobil eco im Handumdrehen selbst ankoppeln.

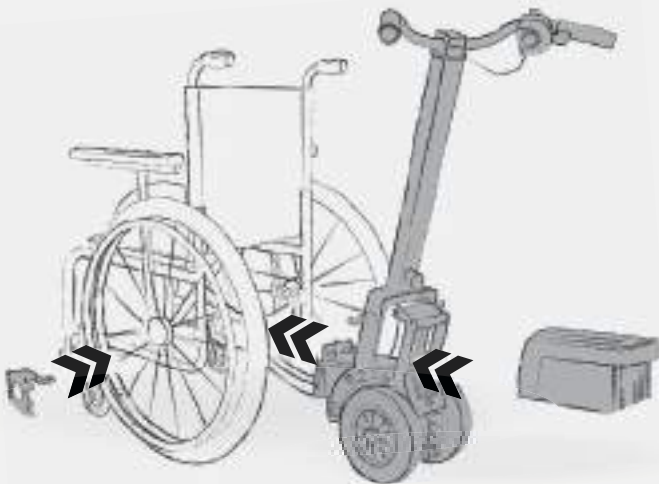

Halterungen für viamobil eco werden von deinem Fachhändler individuell ausgewählt und am Rollstuhl montiert.



So einfach geht's:



1. Antriebseinheit einhängen
Schiebe das viamobil eco von hinten unter den Rollstuhl



2. Antriebseinheit einrasten
Kippe die Antriebseinheit nach oben, bis sie in die Halterung einrastet



3. Antriebseinheit sichern
Drücke die beiden ergonomischen Hebel der Halterung nach unten

Technische Daten

Hilfsmittelnummer:	18.99.04.1012
Geschwindigkeit	1-5,5 km/h
Gewicht gesamt	18,2 kg (Antrieb 10,5 kg, Akkupack 5,7 kg, Bediengerät 2,0 kg)
max. Personengewicht	120 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	170 kg (viamobil eco, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer)
Steig- & Bremsfähigkeit	Bis zu 5,7° (10 %)
Reichweite*	Bis zu 12 km
Akku	2 x 12 V, 7,2 Ah (auslaufsicher und wartungsfrei, für Flugtransport geeignet)
Ladezeit	Ca. 7 Stunden
Maße	290 x 240 x 380 mm (L x B x H)

* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie



i viamobil eco auf Rezept.

Als anerkanntes Hilfsmittel kann viamobil eco von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen.

Hilfsmittelnnummer viamobil eco:
18.99.04.1012

Zubehör

viamobil eco wurde entwickelt, um das Leben jeden Tag ein wenig leichter zu machen. Dafür braucht es durchdachte Technik, einfache Bedienung – und nützliche Extras.

01. Kippstützen

Verhindern das Überkippen des Rollstuhls an steilen Steigungen oder Rampen. Aus Sicherheitsgründen sind sie zum Befahren von Steigungen über 8% vorgeschrieben.

02. Wechsel-Akku

Der leistungsstarke Wechsel-Akkupack (12 V, 7,2 Ah) erhöht den Aktionsradius zusätzlich und ist besonders empfehlenswert bei schweren Personen im Rollstuhl.

03. KFZ-Ladegerät

Mit dem praktischen Ladegerät kannst du den Akku-Pack in deinem Fahrzeug während der Fahrt laden.



Eine Übersicht über das komplette Zubehör findest du auf:
www.alber.de/viamobileco/zubehoer



02.



03.





KOMPAKT KRÄFTIG INTUITIV

via go[®]

Die kompakte Schiebehilfe für Begleitpersonen.





via go passt zu dir, wenn:

- ✓ du eine besonders kompakte und leichte Schiebehilfe möchtest.
- ✓ du eine Schiebehilfe suchst, die du platzsparend zusammen mit dem Rollstuhl falten und verstauen kannst.
- ✓ du für den Alltag eine flexible Unterstützung möchtest, die einfach zu transportieren ist.
- ✓ du im Alltag oder unterwegs kräftige Unterstützung beim Schieben benötigst.
- ✓ du Wert auf eine einfache Bedienbarkeit legst.

Leicht bergauf.

Nicht nur Steigungen oder lange Strecken können im Alltag zu unüberwindbaren Hindernissen werden – auch kleine Rampen oder ein schlechter Straßenbelag machen das Schieben eines Rollstuhls zu einer echten Herausforderung. Die kompakte und kräftige Schiebehilfe via go wird mit wenigen Handgriffen an Standard- und Leichtgewichtsrollstühlen befestigt und liefert sofort die nötige Unterstützung. Auch Personen mit höherem Körpergewicht können mit dem kleinen Antrieb souverän und mühelos geschoben werden.

Die Bedienung ist sehr intuitiv und schnell erlernt. So kommst du wieder in den Genuss einer selbstverständlichen Mobilität.

Passt fast zu jedem

Die qualitativ hochwertige und besonders kompakte Schiebehilfe passt an fast alle gängigen Rollstuhlmodelle. Dein lokaler Sanitätsfachhändler prüft zuverlässig, ob dein Rollstuhl kompatibel ist, erledigt den Anbau und erklärt dir, wie du via go im Alltag ganz leicht selbst an- und abdockst.

Schieben 



Gemeinsam: entspannter.


KOMPAKT

Einfach praktischer.

Durch die großen Vorteile wird das kleine via go schnell zum beliebten Begleiter – die Schiebehilfe unterstützt euch sowohl bei alltäglichen Einkäufen als auch bei ausgedehnten Spaziergängen oder Ausflügen.

Mit den kompakten Maßen und dem geringen Gewicht ist die handliche Schiebehilfe leicht zu transportieren und lässt sich platzsparend nahezu überall verstauen.

- ✓ Kleine, leichte Antriebseinheit mit integriertem Akkupack (5,9 kg)
- ✓ Kann in Kombination mit dem Rollstuhl zusammengeklappt und transportiert werden.

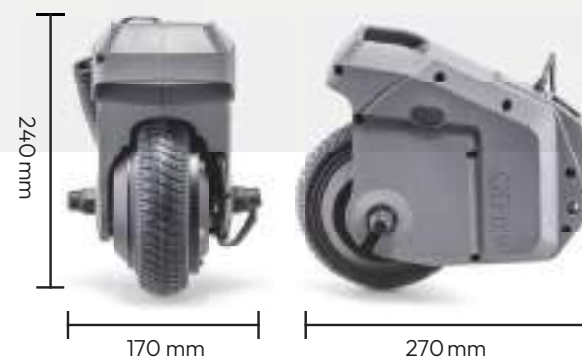

KRÄFTIG

Einfach weiter.

In jeder Stadt gibt es Steigungen oder Rampen: via go bietet dir jederzeit ausreichend Unterstützung, wenn es drauf ankommt.

Obwohl via go so klein und leicht ist, bringt er ordentlich Leistung auf den Weg. Der kräftige Lithium-Ionen-Akku ist besonders langlebig und in max. 5 Stunden schnell wieder aufgeladen. So beförderst du deine Liebsten ganz komfortabel und ohne Schwierigkeiten.

- ✓ Reichweite* bis zu 16 km
- ✓ Steigungen bis zu 16 %
- ✓ Personengewicht bis zu 150 kg



INTUITIV

Einfach schneller.

Auch ohne Vorkenntnisse kannst du via go sofort unkompliziert nutzen. Die großen, übersichtlich gestalteten Bedienelemente sorgen für eine besonders einfache Steuerung.

Auch der An- oder Abbau ist mit nur zwei Komponenten schnell erledigt und erklärt sich fast von selbst. Nach einmaliger Montage der Halterungen durch deinen Fachhändler müssen Antrieb und Steuerung nur noch eingehängt und aufgesteckt werden.

- ✓ Ergonomische, intuitiv verständliche Bedieneinheit
- ✓ Der große Griff erleichtert das An- und Abdocken



viamobil go kostenlos testen.



Vereinbare jetzt online deine unverbindliche via go Probefahrt auf via-go.alber.de/probefahrt

LIEFERUMFANG

Zusammen: einfach stark.



Antriebseinheit/Akkupack



Integrierter Akkupack und wechselbare Bereifung

Bedieneinheit



Ergonomisches Bediengerät mit Kabelanbindung

Ladegerät



Automatische Lade- und Abschaltfunktion.

ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem geringen Gewicht von nur 5,9 kg und dem benutzerfreundlichen großen Griff lässt sich die Antriebseinheit ganz einfach am Rollstuhl an- und abdocken. Das kleine Leichtgewicht bringt trotzdem richtig Power auf die Straße und ist für ein Personengewicht von bis zu 150 kg zugelassen.

Handgriff
einfaches An- und Abdocken

Ladebuchse
zum Aufladen des Akkus

Lithium-Ionen-Akku
Steigungen bis 16 %
Reichweite* bis 16 km

Halterung
für Bediengerät

Antriebsrad
mit wechselbarer Bereifung

Anbindung
des Antriebs inkl. Parkposition

BEDIENGERÄT

Dank der großen Symbole ist das Bediengerät besonders übersichtlich und anwenderfreundlich. Es lässt sich mühelos am Rollstuhl-Schiebegriff anbringen.

Spiralkabel
flexible Verbindung zur Antriebseinheit

Ein- / Aus-Taste
+ Betriebszustandsanzeige
(grün/gelb/rot)

Bedientaste zur Aktivierung der Unterstützung

Akkuanzeige
in 5 Stufen / je 20 % Schritte
(statisch)

Geschwindigkeitseinstellung
über +/- von 1,5–5,5 km/h


Geschwindigkeitsanzeige
in 9 Stufen (blinkend)

KOMBINATION MIT DEM ROLLSTUHL

Let's go.

Andocken und los.

viago passt an alle marktüblichen Standard- und Leichtgewichtrollstühle (Pflegestühle, Sitzschalenuntergestelle oder Kinderrollstühle auf Anfrage) und kann ohne Werkzeug an den Rollstuhl angebracht werden.

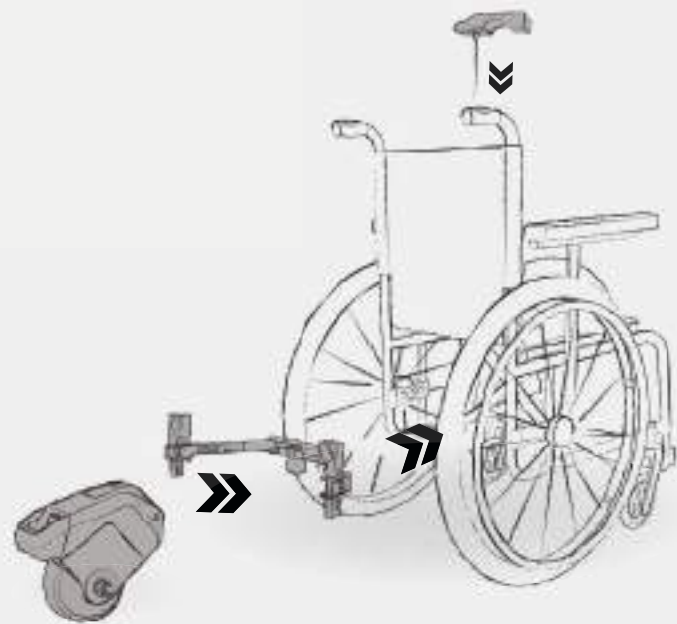

Halterungen für via go werden von deinem Fachhändler individuell ausgewählt und am Rollstuhl montiert.

So einfach geht's:



1. Antriebseinheit andocken

Hänge die Antriebseinheit des via go von oben in die montierte Halterung ein.



2. Bedieneinheit anbringen

Stecke das Steuerungsmodul auf die kleine Halterung am Schiebegriff des Rollstuhl.



3. Let's go

Schalte das via go ein und aktiviere die Unterstützung einfach mit der Daumentaste.



i via go auf Rezept.

Als anerkanntes Hilfsmittel kann via go von deiner Krankenkasse bezuschusst werden – oft werden die Gesamtkosten oder ein großer Teil davon übernommen.

Hilfsmittelnummer via go:
18.99.12.1003

Technische Daten

Hilfsmittelnummer:	18.99.12.1003
Geschwindigkeit	1,5–5,5 km/h
Gewicht	
gesamt	6 kg (Antrieb 5,9 kg, Bediengerät 140 g)
max. Personengewicht	150 kg
max. zulässiges Gesamtgewicht	170 kg (via go, Rollstuhl und Rollstuhlfahrer)
Steigfähigkeit	Bis zu 9° (16 %)
Reichweite*	Bis zu 16 km
Akku	36 V; 4,5 Ah (auslaufsicher und wartungsfrei, Lithium-Ionen, 24 Monate Garantie, für Flugtransport geeignet)
Ladezeit	Ca. 5 Stunden
Maße	270 x 170 x 240 mm (L x B x H)

* Nach ISO 7176, abhängig von Untergrund, Anwendergewicht, Temperatur und Topografie



Das scalamobil passt vielleicht auch zu dir?

Mobile Treppensteiger von Alber.

scalamobil oder scalcambi kommen dann zum Einsatz, wenn im eigenen Haushalt oder unterwegs Stufen überwunden werden müssen. Die Treppensteiger eignen sich vor allem dann, wenn Umbaumaßnahmen nicht möglich oder unerwünscht sind und die Begleitperson dennoch einfache und sichere Unterstützung benötigt.

Powered by alber.

Unsere Medizinproduktberater sind in ganz Deutschland flächendeckend vertreten. Vereinbare jetzt deinen Termin für eine kostenlose und unverbindliche viamobil eco oder via go Probefahrt bei dir Zuhause in deinem gewohnten Umfeld.

Auf unserer Webseite findest du noch viele weitere Infos zu unseren Produkten und Antworten auf all deine Fragen rund um Kostenerstattung bei deiner Krankenkasse oder Hilfsmittelnnummer.

0800 1224567 (gebührenfrei)

Servicezeiten durchgehend von
Mo.-Do. von 8:00–17:00 Uhr, Fr. bis 16:00 Uhr.

www.alber.de



scalamobil®

Die mobile Hilfe für einfaches
und sicheres Treppensteigen.



Mehr erfahren?

Alle Infos zum scalamobil findest du auf:
www.alber.de/scalamobil